

PCR検査の実施手順

1. 検査を申込みいただいた方には、PCR検査キットを学校から配布します。(個人別にラベルが添付されています。)



PCR検査キットの内訳

- ①外箱兼三次容器 (輸送用段ボール)
- ②使用説明書
- ③検体送付用伝票
- ④一次容器 (25ml 遠沈管)
- ⑤二次容器 (プラスチックバッグ)

2. 検体採取・送付にあたっては、キット同封の使用説明書をよくご確認ください。

3. 一次容器には、受け取りいただく時点で、既に薬品 (不活化保存液) が入っています。この薬品は入ったまま、唾液を入れてください。

不活化保存液は捨てないでください。
不活化保存液が入ったまま唾液を入れてください。



一次容器

4. 箱は8本の検体を収容可能な大きなサイズのものですが、検体を1本収納して、直接検査実施機関あて発送してください。



5. PCR検査結果については、検査終了後、各学校を通じてすみやかにお知らせします。